

Eye Mobile Plus

Pour quels types de handicap ?



Eye Mobile Plus est une commande oculaire montée sur une station d'accueil pouvant accueillir une tablette. Cela permet aux personnes de pouvoir interagir avec le regard, de naviguer sur internet, de communiquer et de contrôler l'environnement.

Eye Mobile Plus est composé d'une station d'accueil pouvant être fixée sur bras pour une utilisation au lit ou au fauteuil, et possède son propre support pour être disposé sur une table. La station d'accueil est compatible avec différentes tablettes Windows. Le module de commande oculaire est fixé sous l'écran, il se connecte uniquement en USB sur la tablette (auto alimenté) mais ne peut pas se désolidariser pour se fixer sur un autre support.

Eye Mobile Plus fonctionne comme une souris. Les utilisateurs peuvent maintenant avoir un accès et un contrôle total de leurs programmes Windows personnels avec simplement leurs yeux.

Eye Mobile Plus est précis, fiable et facile à utiliser. Sans être perturbé par les affections oculaires individuelles (réglable sur un seul œil par exemple), ni les mouvements de tête incontrôlables ou les variations d'intensité lumineuse, il suit avec précision tous les mouvements oculaires que vous réalisez.

Placez-vous face à l'écran à l'aide de l'indicateur, calibrer en quelques secondes, et vous voilà maître de votre Tablette grâce à vos yeux...

Calibrage sauvegardé, et rarement, sinon jamais, répété pour un même utilisateur.

Eye Mobile Plus peut aussi être paramétré pour plusieurs utilisateurs, le rendant très intéressant pour un usage collectif comme dans une classe d'école, une institution spécialisée, un centre de rééducation, ...

Eye Mobile Plus est indépendant de votre tablette, et cela vous permet de garder un niveau de performance technologique.

Eye Mobile Plus peut être couplé à l'utilisation d'un logiciel comme Grid 3 ou Communicator 5 pour pouvoir faciliter l'accès informatique ou être utilisé comme moyen de communication alternative. Il dispose d'un haut-parleur et d'un contrôle d'environnement infra rouge.

Eye Mobile Plus est particulièrement destiné aux :

- Blessés médullaires hauts (L.I.S, Tétraplégiques,...) souhaitant utiliser l'outil informatique
- Personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives (SLA, SEP, Parkinson,...)
- Personnes présentant une athétose limitant l'accès par pointage digitale pour l'accès informatique

Pourquoi Eye Mobile Plus ?

Accessibilité

- Par commande oculaire :
 - avec validation automatique (délai de temporisation réglable)
 - validation par contacteur (contacteur et adaptateur USB-contacteur en option)
 - validation par le clignement des yeux
 - validation par système de zoom progressif
- Réglage un seul œil possible
- Utilisation de lunettes et lentilles de contacts possible (vérifier les reflets)
- Par écran tactile (de la tablette)
- Par défilement contacteur
- Par souris/joystick

Actions

- Contrôle de la navigation du pointeur par le regard
- Utilisation d'un clavier virtuel adaptable
- Possibilité de coupler avec l'installation de logiciel de communication et d'adaptation de l'environnement Windows : accès simplifié aux emails, Facebook, YouTube... (Grid 3, Communicator 5...)
- Téléphonie GSM et SMS (selon logiciel)
- Contrôle d'environnement (avec Virtual Remote, ou Communicator 5)


Caractéristiques

- Haute précision pendant les **mouvements de tête** sans interrompre le suivi oculaire en cours (idéal pour personnes athétosiques)
- Suivi presque universel, inégalé - de nombreuses données montrent que les commandes oculaires Tobii suivent précisément, de manière fiable et automatiquement les mouvements de plus de 95% des gens
- Portabilité totale

Eye Mobile Plus	
Distance de fonctionnement	45-85 cm de l'écran
Plan d'action à 65 cm de l'écran	40 cm (gauche-droite) 30 cm (haut bas)
Taille d'écran	10,8 pouces
Tablettes compatibles et exigences	Microsoft surface Pro 4 (Windows 10) Autres tablettes en tenant compte de la dimension : Windows 7, 8.1 ou 10 Processeur : 2 Ghz ou plus double Coeur RAM : 4Go Espace disque : 450Mo disponible USB 2.0 ou 3.0
Autonomie	9 heures avec Microsoft surface Pro 4
Montage	Seul sur une table avec le support intégré ou sur bras spécifiques (fauteuil ou lit)
Alimentation	Batterie – temps de charge 4 heures.
Poids	0,670 kg (1,44 kg avec Microsoft surface Pro 4)
Taille	170 *(200/230)*45mm sans tablette et 292*220*45mm avec Surface pro 4
Système	1 port USB2.0 1 port Micro USB 3.0 2 entrées contacteur jack 3,5mm



Exemple de « Windows Control 2 » pour naviguer dans l'ensemble des programmes de Windows.

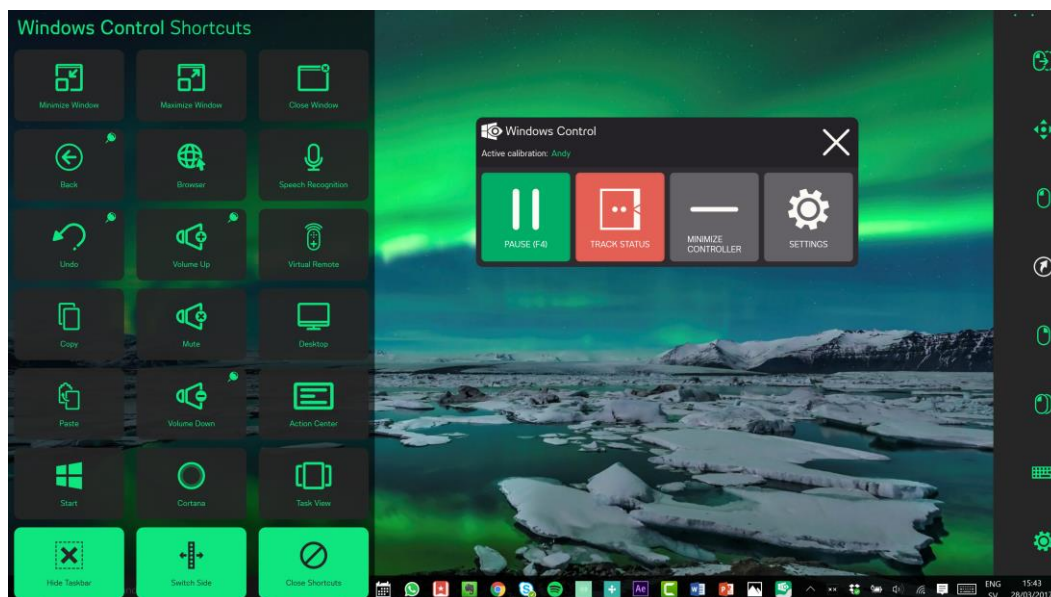

Références

Référence	Désignation
7TD51	Eye Mobile Plus Access - Microsoft surface
7TD5101	Eye Mobile Plus Access - sans tablette
7TD5103	Eye Mobile Plus Communicator - Microsoft surface
7TD5104	Eye Mobile Plus Communicator - sans tablette
7TD51G3	Garantie 3 ans Casses incluses Eye Mobile Plus*
7E30	Logiciel Grid 3 (Licence 1+1 activation – édition à distance gratuite pour les accompagnants)
7TD51FIX	Adaptateur Eye mobile + et I110 pour Support RHD Voir fiche supports les solutions de montage sur table, fauteuil, lit,...
706201ATPCO2	Assistance Technique Premium 2 ans
706201ATPCO3	Assistance Technique Premium 3 ans
706201ATPCO5	Assistance Technique Premium 5 ans
ZZMISES3	Mise en service et initiation sur site avec logiciel de communication

*Voir conditions sur fiche « garantie »

Accompagnement

Par la société Cenomy ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services pour vous accompagner dans un projet durable :

- Expert depuis plus de 30 ans
- Installation/mise en service
- Assistance technique Premium
- Formation spécifique

Assistance technique

CENOMY issue de Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national et international pour le développement des technologies au service de l'indépendance et de l'autonomie des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maîtriser, de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela CENOMY propose un service d'assistance Premium pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l'utilisation quotidienne de ces technologies. Découvrez les services proposés par l'Assistance Premium sur notre site internet.

Contacts et renseignements



info@cenomy.com



03 80 78 42 20

[Formulaire de demande d'évaluation](#) sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

Assistance technique

Présentez votre numéro client à l'appel ou dans votre mail



support@cenomy.com



03 80 78 42 49

[Formulaire de prise en charge SAV](#) sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

Et retrouvez toute notre actualité sur :
www.cenomy.fr

